


RS AWAL BROS	PENGELOLAAN PATIENT MONITOR		
	No. Dokumen: SPO/RSAB-AY/ Jangmed/Elektromedis/ 004/2025	Revisi: 00	Halaman: 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 21 Mei 2025	Ditetapkan: Direktur  dr. PRIMA APRIANTI	
PENGERTIAN	Patient Monitor adalah suatu alat yang digunakan untuk memonitor fisiologis pasien. Pemeriksaan aktivitas kelistrikan jantung, irama nafas pasien dalam satu menit, kadar oksigen dalam darah, tekanan darah, dan dan pengukuran suhu tubuh pasien yang di monitor secara terus menerus.		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam menggunakan alat dan petugas memahami dalam menggunakan patient monitor.		
KEBIJAKAN	Peraturan Rumah Sakit Awal Bros A. Yani No. 0937/04.03/DIR/RSAB-AY/SK/X/2024 Tentang Panduan Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Medis RS Awal Bros A. Yani		
PROSEDUR	A. Persiapan Oleh Pengguna Alat: 1. Pengguna alat menghubungkan kabel power ke sumber listrik. 2. Pengguna alat memasang aksesoris untuk semua parameter seperti ECG, SPO2, NIBP, temperature pada port sebelah kiri alat. 3. Pengguna alat menyiapkan elektroda yang akan ditempelkan pada pasien. B. Pengoperasian Alat: 1. Pengguna alat menyalakan alat dengan menekan tombol power. 2. Pengguna alat dapat mengontrol penginputan dengan memutar rotary knob dan konfirmasi dengan menekan rotary knob. 3. Pengguna alat mengisi data pasien seperti nomor medred,		

RS AWAL BROS	PENGELOLAAN PATIENT MONITOR		
	No. Dokumen: SPO/RSAB-AY/ Jangmed/Elektromedis/ 004/2025	Revisi: 00	Halaman: 2 / 3
	<p>nama, tanggal lahir, tinggi dan berat badan pasien.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna alat memasang aksesoris parameter EKG pada tubuh pasien. Pengguna alat memasang aksesoris parameter <i>NIBP</i> pada lengan pasien. Pengguna alat memasang aksesoris parameter <i>SPO2</i> pada jari pasien. Pengguna alat memasang aksesoris parameter <i>temperature</i> pada ketiak atau lipatan tubuh pasien. Apabila sudah terpasang semua aksesoris parameter, maka pengguna alat dapat memantau kondisi pasien dari alat <i>patient monitor</i>. Setelah alat digunakan pengguna alat mematikan alat dengan menekan tombol power. Kemudian pengguna alat melepaskan kabel <i>power</i> dari sumber listrik. Pengguna alat merapihkan dan menyimpan aksesoris pada tempatnya. <p>C. Pembersihan Oleh Pengguna Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna alat melakukan pembersihan alat dengan menggunakan <i>tissue</i> lembut setelah alat selesai digunakan. Setelah alat dibersihkan, posisikan kembali alat pada tempatnya. <p>D. Pemeliharaan Oleh Petugas Elektromedis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas elektromedis melakukan pengecekan kondisi fisik pada bagian <i>body</i> dan aksesoris. Petugas elektromedis melakukan pengecekan fungsi 		

RS AWAL BROS	PENGELOLAAN PATIENT MONITOR		
	No. Dokumen: SPO/RSAB-AY/ Jangmed/Elektromedis/ 004/2025	Revisi: 00	Halaman: 3 / 3
	<p><i>patient monitor</i> berfungsi dengan baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas elektromedis memastikan bahwa alat <i>patient monitor</i> dalam keadaan siap untuk digunakan dan apabila ada kerusakan petugas elektromedis segera melakukan perbaikan. Petugas elektromedis melakukan pemeriksaan inspeksi dan <i>preventive maintenance</i> setiap 6 bulan sekali. <p>E. Pemeliharaan Oleh Pengguna Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna alat melakukan pengecekan pada bagian <i>body</i> dan aksesoris dalam kondisi baik. Pengguna alat memastikan bahwa alat <i>patient monitor</i> dalam keadaan siap untuk digunakan dan apabila ada kerusakan petugas elektromedis segera melakukan perbaikan. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> Logistik Medis Elektromedis Perawat 		
DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> Formulir Pemeliharaan & Uji Fungsi Peralatan Medis 		

RS AWAL BROS

Riwayat Dokumen

Siklus Review		<input type="checkbox"/> 1 tahun	<input checked="" type="checkbox"/> 3 tahun	Tanggal Review 00 Oktober 2028
Revisi	No Dokumen	Ringkasan Perubahan		Diusulkan oleh
00	No. Dokumen: SPO/RSAB-AY/ Jangmed/Elektromedis/ 004/2022	-		-
01	No. Dokumen: SPO/RSAB-AY/ Jangmed/Elektromedis/ 004/2025	1. Perubahan kebijakan 2. Perubahan nomor dokumen menjadi logistik medis Perubahan isi prosedur		Pelayanan &Penunjang Medis
02	No. Dokumen: SPO/RSAB-AY/ Jangmed/Elektromedis/ 004/2025	1. Perubahan tata naskah		Kepala divisi penunjang medis